

Vendita e Noleggio
macchinari estetico
medicali
Estetica avanzata



Tel. 3393300174 Marco
exclusivebeautyge@gmail.com
www.exclusivebeautysrl.it
Sede a Genova salita mermi 10 a
p.iva 02367110992

HYDRAFACIAL MACHINE

USER MANUAL



1. INFORMAZIONI PRINCIPALI

Le bolle ultramicroscopiche con la loro pressione vacuum negativa vanno a formare un circuito vacuum, che combina l'utilizzo delle microbolle e delle soluzioni nutrienti (ad es. acido ialuronico) lavorando sulla pelle tramite una testina dallo speciale design, a piccola spirale. In questo modo le microbolle restano a contatto con la pelle per un periodo abbastanza lungo da generare un effetto peeling.

A cosa serve questo macchinario? Pulisce la superficie da ogni tipo di impurità, rimuove il sebo, rimuove i segni dell'età, e fa sì che i follicoli si riempiano di nutrienti; in questo modo la pelle resta idratata a lungo, e dall'aspetto molto luminoso.

Sapevate che circa mezzo litro d'acqua viene rilasciata dal nostro viso ogni giorno? Inoltre, l'81% delle donne soffre di pelle ruvida e pori dilatati. Il 95% delle donne, invece, è desiderosa di trovare un trattamento realmente efficace per il trattamento della pelle del viso.

2. EFFICACIA

Utilizzabile per il trattamento dell'acne, alopecia seborroica e allergie della pelle.

Utile anche per trattamenti schiarenti e per migliorare, in generale, l'aspetto della pelle del viso.

Pulisce la pelle in profondità, la idrata e promuove il metabolismo cellulare; inoltre, migliora l'aspetto dei punti neri e dei pori dilatati, rendendo la pelle

pulita, liscia e compatta. Diversi trattamenti ravvicinati possono dare miglioramenti visibili anche sull'inestetismo chiamato "doppio mento".

Può essere inoltre usato in fase pre-e post di trattamenti esfolianti e trattamenti antiage

1.

MANIPOLO PER ELIMINARE LE BOLLE (8 TESTINE)

Prima pulire la pelle dalle bolle con il manico. succhiare la pelle dal centro verso entrambi i lati, scivolare velocemente, ma non rimanere troppo a lungo sullo stesso punto. Per la pelle sensibile, utilizzare la punta piatta. Per i pori dilatati e la zona T utilizzare la punta con superficie opaca.



2.

MANIPOLO A ULTRASUONI

I prodotti a ultrasuoni si immettono nei tessuti sottocutanei favorendo la microcircolazione e il rinnovamento della pelle. Questi prodotti possono penetrare in profondità nella pelle, per accelerare l'assorbimento.

3.

MANIPOLO A FREQUENZE RADIO

Posizionare sul tessuto interessato che verrà scaldato per aprire i pori e promuovere la contrazione del collagene sottocutaneo, alleviare le rughe, produrre nuovo collagene. In seguito la pelle sarà più compatta.



4.

MANIPOLO A FREDDO

Telecomando per riparazione a freddo, può congelare la pelle e restringere i pori. L'energia del ghiaccio può penetrare dall'epidermide alla pelle profonda, istantaneamente formare una forte chiusura dei pori della pelle, quindi uno strato di maschera naturale si forma sulla superficie della pelle per bloccarla.

5.

MANIPOLO A TERAPIA MICROELETTRICA

Lifting biologico, aumenta la permeabilità delle cellule, aiuta il corpo ad assorbire meglio i nutrienti e l'acqua, ossigena, migliora il livello di sintesi del collagene e riduce le rughe, in modo che la pelle diventi più morbida, flessibile e lucida.



6.

SPRAY OSSIGENO

Può iniettare e sprigionare ossigeno con una sola macchina. Risolvendo le difficoltà di ipossia. Inietta ossigeno purificato al 98% e attiva il distillato nutrizionale sulla pelle attraverso la forza d'impulso per accelerare il metabolismo delle cellule, schiarire la pelle e stirarla.

3. ACCESSORI

Le testine sono strutturate in maniera diversa, tutte permettono il passaggio dell'acqua, con diversi tipi di aspirazione.

Le testine sono di quattro tipi, ovvero piatte, dritte, a risucchio centrale o a vortice. Si può scegliere quale utilizzare, in quest'ordine, per trattare la pelle più in profondità oppure più in superficie

4. MODO DI UTILIZZO

Una volta acceso il macchinario, si può facilmente selezionare l'accessorio che si vuole utilizzare, dopo aver posizionato la testina corretta. Il tempo di trattamento consigliato è di 30 minuti, e può essere anch'esso selezionato tramite il touch screen.

Il pulsante START può essere utilizzato sia per far partire il macchinario sia per fermarlo durante l'utilizzo.

L'intensità di tutti i manipoli, fatta eccezione per la bubble pen e l'ossigeno, può essere scelta da 1 a 10.

Prima dell'utilizzo, verificare che tutti i manipoli siano connessi correttamente sul retro del macchinario, poi premere il tasto ON e scegliere il manipolo che si vuole utilizzare tramite il touch screen, da sinistra verso destra si trovano le icone, in quest'ordine: Bubble pen, testina per terapia ad impulsi elettrici, radiofrequenza, ultrasuoni e il manipolo ICE, ovvero che lavora con il freddo.

Una volta terminato l'utilizzo, pulire i manipolo e lasciarli in una zona ventilata.

NOTE:

La Bubble pen è fissata in modo da non poterla aprire.

Non rimuovere mai i contenitori dalla base per evitarne il danneggiamento.

5. PARAMETRI TECNICI

Voltaggio: AC110vb 220 230vb 240vb

Frequenza: 50hz

Potenza: 26W

Misura: 47x37x37 cm

6. SERVIZIO E MANUTENZIONE

Questo strumento è garantito per due anni (uno nel caso in cui questo venga acquistato usato) dall'acquisto, presentando scontrino o fattura. Le parti consumabili per utilizzo non sono coperte da garanzia, così come non sono coperti i danni accidentali.

La Exclusive Beauty Srl è responsabile per tutti i lavori di manutenzione e per l'applicazione della garanzia.